



FEBRE AMARELA

PRIMATAS NÃO HUMANOS

ATUALIZAÇÃO: 13 DE FEVEREIRO DE 2025

CASO SUSPEITO

TODOS OS PRIMATAS ENCONTRADOS MORTOS, DE VIDA LIVRE OU EM CATIVEIRO DEVE TER AMOSTRAS COLHIDAS E ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO PARA O DIAGNÓSTICO DE FEBRE AMARELA.

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

- PREENCHER FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE EPIZOOTIA E INSERIR SINAN.

DIAGNÓSTICO

- ENVIAR AMOSTRAS AO INSTITUTO ADOLFO LUTZ COM:
 - CADASTRO NO SISTEMA GAL ANIMAL;
 - LISTA DE REMESSA DE AMOSTRAS;
 - CÓPIA DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DO SINAN DEVIDAMENTE PREENCHIDA; E
 - IDENTIFICAÇÃO DO PRIMATA NO SISTEMA GAL ANIMAL E/OU NA FICHA DE NOTIFICAÇÃO (EX: BUGIO, MACACO PREGO, SAGUI, SAUÁ).

PESQUISA NO GAL ANIMAL	MATERIAL BIOLÓGICO	COLETA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Febre Amarela - virologia	Fígado* , baço e cérebro	• Congelado (-80°C ou -20°C). • Acondicionado em tubo plástico hermético e estéril. • Preferencialmente em nitrogênio líquido. Na impossibilidade utilizar caixa refrigerada.
Febre Amarela Patologia	Pool de vísceras (fragmentos de fígado* , baço, rim, coração, pulmão, cérebro)	• Acondicionar em frasco de boca larga com formalina tamponada suficiente para cobrir os fragmentos. • Manter e transportar em temperatura ambiente.

***obrigatório**